

Inštalačný manuál pre elektrický stojan

EasyLight



ZOZNAM SÚČIASTOK

A) Podpera (1)



B) Základňa(1)



C) Univerzálne kolečko(4)



D) Kryt základne(4)



E) Diaľkový ovládač(1)



F) Napájací kábel(1)



G) Adaptér(1)



H) Ovládacia skrinka(1)



I) Ovládací panel(1)



J) Upevňovacia tyč
pre panel(2)



K) Priečna výstuha (2)



L) Spojka podpery a výstuhy(1)



M) Skrutky M6*14(18)



N) Skrutky M8*60(8)



O) Skrutky M5*10(6)



P) Skrutky M8*20(4)



Q) Skrutky M6*16(6)



R) Podložky




R) Šest'hranný klíč(3)
– 4mm, 5mm, 6mm




S) Vidlicový klíč 13,14 T) kryty na výstupy




2. Priskrutkujte kolečka na základňu a pomocou vidlicového kľúča ich dotiahnite. Položte kryt základne tak, aby káble išli cez výrez v kryte a priskrutkujte ho pomocou skrutiek M5*10. Adaptér a ovládací panel nenechávajte v základni, ostáva v nej len ovládací skrinka.

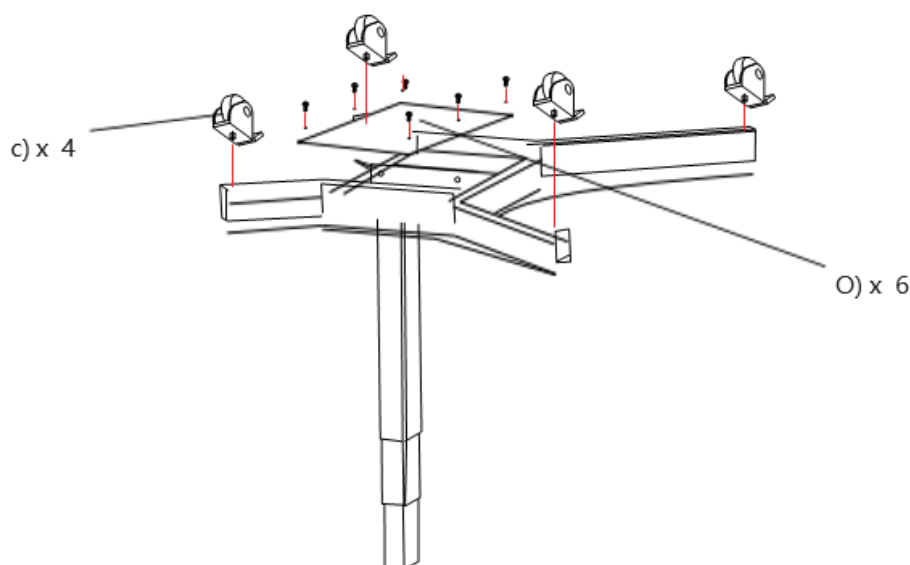

3. Stojan si položte kolečkami na zem a podľa obrázku priskrutkujte spojku podpory a výstuhy na podporu stojana pomocou skrutiek M8*20. Na skrutky použite aj podložky. Keď dotiahnete všetky 4 skrutky na spojke, priskrutkujte na ňu priečne výstuhy pomocou skrutiek M8*60. Na skrutky použite podložky.

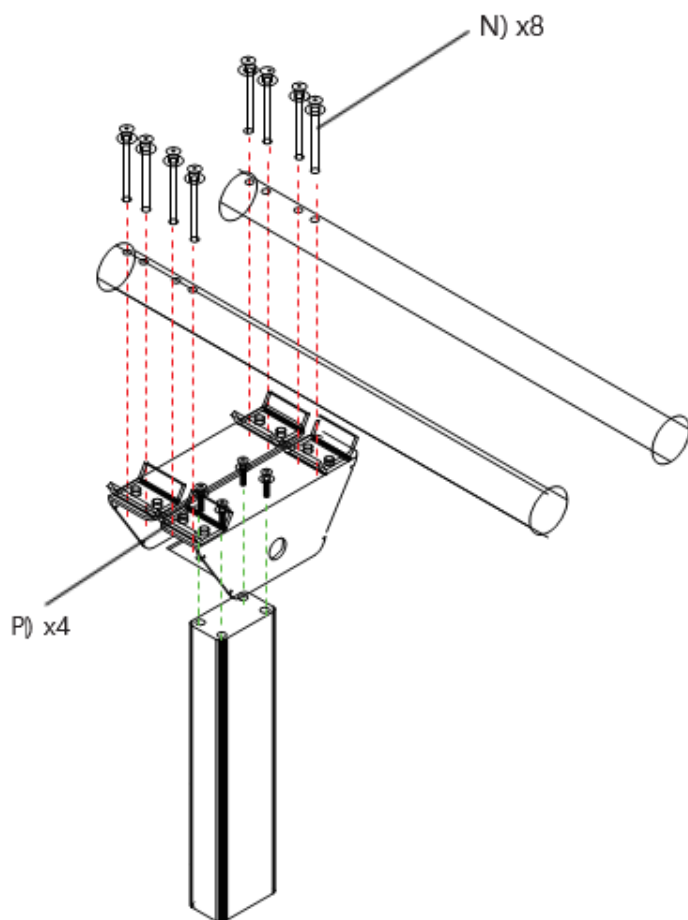


4. Ako namontovať panel na stojan. Pomocou skrutiek M6*14 priskrutkujte upevňovacie tyče na zadnú stranu panelu/panelov.
5. Ak chcete panely **Slim 2.0 spojiť a synchronizovať viaceré**, návod je v našom pomocníkoví: www.pomocnik.easylight.sk

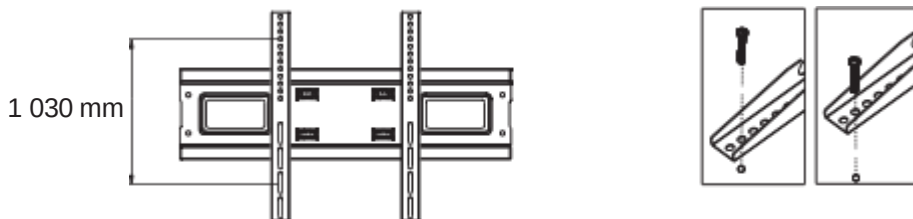

1x Mitochondriak Slim 2.0 pulse




2x Mitochondriak Slim 2.0 pulse

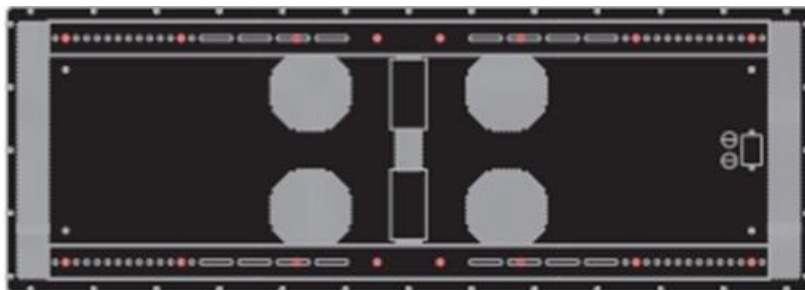


1x Mitochondriak 2.0 pulse profi

6. Zabrzdite kolieska na stojane a pomaly nasuňte panel na výstuhu.
Upevňovacie tyče priskrutkujte k výstuhám pomocou skrutiek M6*14.

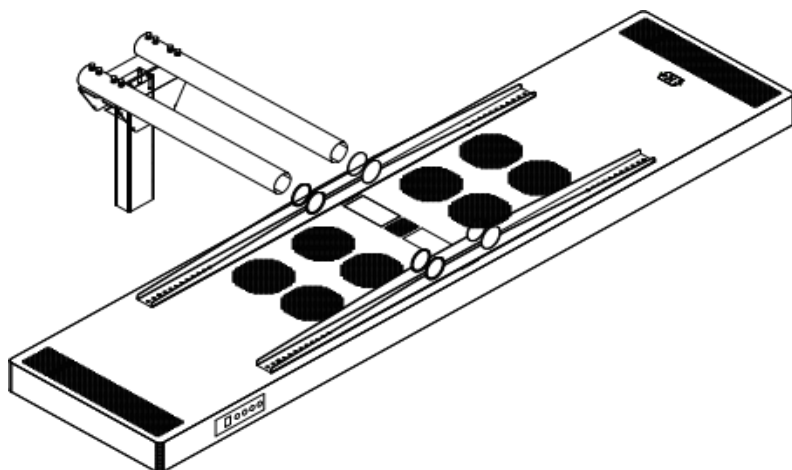


Infračervený a červený panel je možné otočiť o 180° a použiť na vertikálne aj horizontálne použitie.

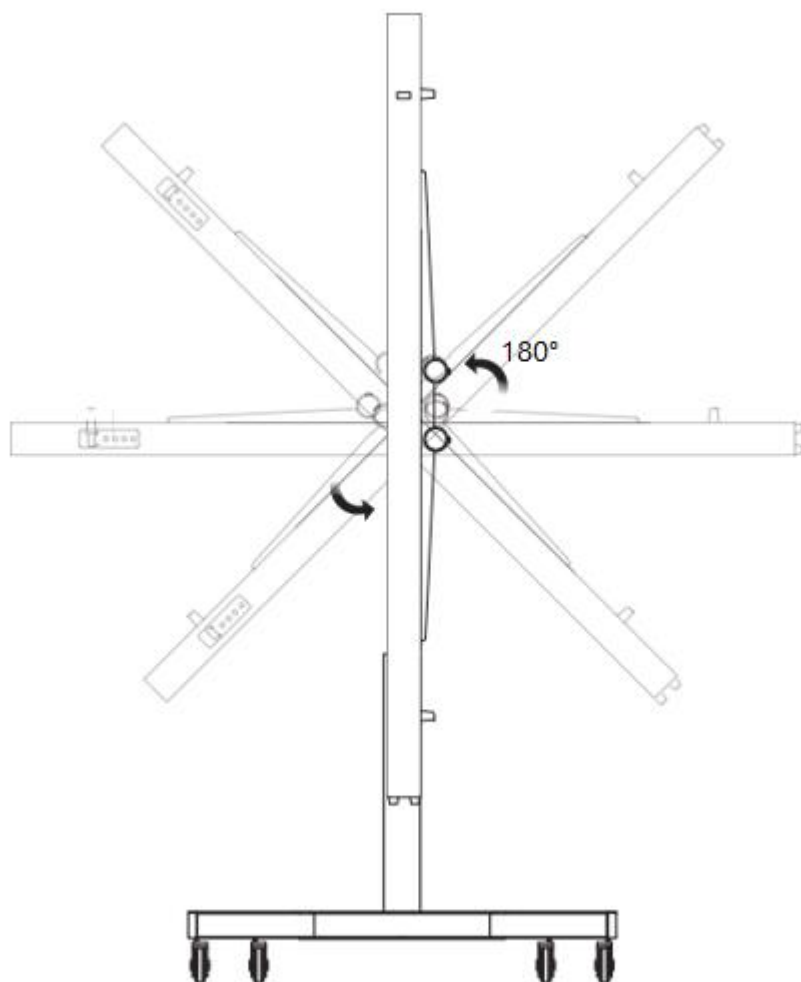


Návod na obsluhu

Diaľkový ovládač

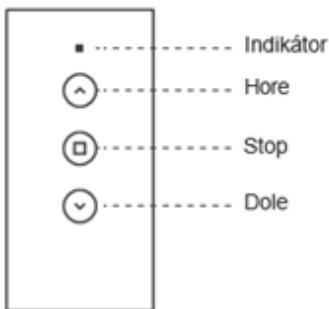

Ovládací panel

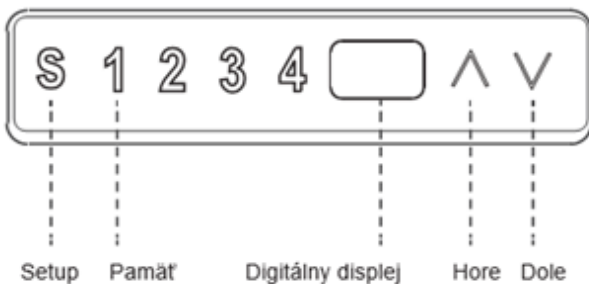

Párovanie diaľkového ovládača so stojanom

Držte stlačené tlačidlo nahor“ $\wedge$ „, zatiaľ pripojte adaptér aj ovládaciú skrinku, až kým nezačujete bzučanie.

Resetujte operáciu

Po úspešnom pripojení medzi riadiacim systémom a stojanom podržte tlačidlo dole“ $\vee$ „na niekoľko sekúnd, systém prejde do inicializačného režimu. Potom uvoľnite tlačidlo, kým LED displej neukáže číslo (výšku).

Operácia zastavenia stojana

Diaľkové ovládanie: Keď stojan počas stúpania chcete zastaviť, potom môžete stlačiť tlačidlo "o", stojan sa zastaví. A ak je potrebné zastaviť stojan počas klesania, môžete stlačiť tlačidlo "o", a stojan prestane klesať.

Funkcia pamäte

Dotknite sa tlačidla "S", indikátor zobrazuje "S-", a súčasne sa dotknite tlačidla "1-4", aby ste túto pozíciu vyhradili na relatívnu "1-4", je možné uložiť štyri pamäťové pozície .

Konverzia jednotiek

Podržte stlačené tlačidlo "S" na 8 sekúnd, systém jednotiek "cm" "palce" sa automaticky prepne.

Ochrana operačného systému

Po 3 až 4 nepretržitých chodoch bude riadiaci systém v ochrannej polohe. Na obrazovke sa zobrazí „HOT“ a diaľkový ovládač a ovládač sa vypnú. O niekoľko minút neskôr sa automaticky odpojí alebo sa priamo vypne (vypnutie indikuje zhasnutie kontrolky adaptéra)

Prevencia:

- 1) Výrobok sa používa v súlade s technickými parametrami;
- 2) Uchovávajúte mimo dosahu korozívneho plynu a prašného prostredia, dávajte pozor na vodotesnosť. Môže normálne fungovať po vykonaní operácie RESET, keď ovládač zobrazí „RST“.



Easy Light

...pretože na svetle záleží!

www.easylight.sk